

ПРИКЛЕЙ – ОТКЛЕЙ – ПРОВЕРЬ

Для пациентов с колостомами и илеостомами

Своевременная замена калоприемников позволяет сохранить здоровую кожу и обеспечивает комфорт и безопасность.













Проверь





Фото 1



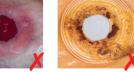


Фото 2





Перед тем как наклеить калоприемник, убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая.

- 1. Аккуратно вымойте кожу вокруг стомы теплой водой и осторожно высушите ее мягким полотенцем.
- 2. Для защиты кожи от контакта с кишечным содержимым измерьте свою стому и вырежьте в клеевой пластине калоприемника отверстие, соответствующее размеру и форме стомы. Перед использованием калоприемников прочитайте инструкцию по применению.
- 3. Чтобы герметично приклеить пластину калоприемника, вам могут понадобиться дополнительные средства ухода за кожей вокруг стомы (проконсультируйтесь со специалистом по уходу за стомой).

Чтобы не повредить кожу вокруг стомы, необходимо правильно и осторожно отклеивать калоприемник.

- 1. Возьмите пластину за специальное ушко и осторожно отклейте ее сверху вниз, при этом другой рукой натягивайте кожу живота вокруг пластины.
- 2. Вы никогда не должны чувствовать жжение или зуд. Если вы чувствуете зуд и жжение, то калоприемник следует менять чаще.

Осмотр пластины калоприемника и кожи вокруг стомы покажет, насколько правильно и своевременно вы меняете калоприемник.

- 1. Проверьте, повреждена ли пластина, имеется ли на клейкой стороне пластины кишечное содержимое. Если пластина повреждена (клеевой слой размыт), то кожа вокруг стомы, наверняка, раздражена.
- 2. Чтобы как следует осмотреть кожу вокруг стомы, используйте зеркало. Сравните кожу вокруг стомы с кожей на другой половине живота. Смотрите для примера фото ниже.

Фото 3

На фото 1 и 2 слева покраснение и раздражение кожи, как и повреждение клеевой пластины вызвано протеканием кишечного содержимого под пластину в результате несвоевременной замены калоприемника, т.е. его слишком длительного ношения.



Сравните состояние кожи на фото 1 и 2 со здоровой неповрежденной кожей на фото 3.

При длительном ношении калоприемника клеевая пластина впитывает слишком много влаги и начинает разрушаться (клеевой слой размывается). В результате на кожу попадает кишечное содержимое, вызывая ее раздражение.

Чтобы сохранить кожу вокруг стомы здоровой, своевременно меняйте калоприемники и соблюдайте простое правило: ПРИКЛЕЙ – ОТКЛЕЙ – ПРОВЕРЬ.

| Наимен | ование изделия | Ежедневная норма потребления, шт. | Ежемесячная норма потребления, шт. |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Однокомпонентный дренируемый калоприемник | 1 | 30 |
| | Однокомпонентный недренируемый калоприемник | 2 | 60 |
| Двухком | понентный калоприемник: | | |
| | Пластина | 1 на 3 дня | 10 |
| Ö | Дренируемый мешок | 1 | 30 |
| Ö | Недренируемый мешок | 2 | 60 |
| Средства ухода за кожей и аксессуары (если рекомендовано): | | | |
| in and | Очиститель (клинзер), 180 мл | | 1 |
| 730 | Паста в тубе, 60 г | | 1 шт. |
| 1 | Паста в полосках, 6 г | | 10шт./ 1 упак. |
| Level 1 | Защитный крем, 60 мл | | 1 |
| | Абсорбирующий порошок (пудра), 25 г. | | 1 |
| | Защитная пленка «Преп», салфе | тка | 30 |
| | Нейтрализатор запаха, 50 мл | | 1 |

Центр поддержки пациентов «Колопласт» 8 800 700 11 26

Звонок бесплатный

пн.-чт. с 08:00 до 20:00 пт. с 08:00 до 18:45 по московскому времени

